

Новые предложения для бактериологических лабораторий

**Докладчик: Гураль Наталья Викторовна
ЗАО «Эрба Рус»**

2017

Тест-системы для определения МПК антибиотиков

**1.Наборы содержат по 12
антибиотиков на панели в 8
концентрациях. Наборы могут быть
считаны как визуально, так и
автоматически**





Планшеты разработаны в соответствии со стандартами Европейского комитета по определению чувствительности к антибиотикам (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST)

<i>Наименование</i>
СЕНСИЛАТЕСТ MIC URINE
СЕНСИЛАТЕСТ MIC G+
СЕНСИЛАТЕСТ MIC G-I
СЕНСИЛАТЕСТ MIC G-II
СЕНСИЛАТЕСТ MIC NEFERM
СЕНСИЛАТЕСТ MIC STAPHY

Наборы для определения чувствительности к антибиотикам MIC


Несомненные плюсы:




- несложная интерпретация данных в соответствии с EUCAST
- учет результатов визуально или фотометрически по наличию бактериального роста в микролунках планшета,
- большой срок годности,
- хранение при температуре 2 -25° С
- Срок хранения 18 месяцев

Схема работы

- Выделение чистой культуры
- Стандартизация мутности
приготовленной бактериальной
сuspension
- Инокуляция (внесение материала)
- Внесение инкулята в суспензионную
среду
- Инкубация
- Считывание и оценка результатов

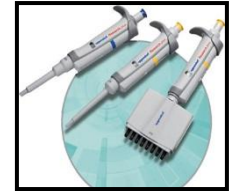

Автоматическая станция для заполнения планшетов

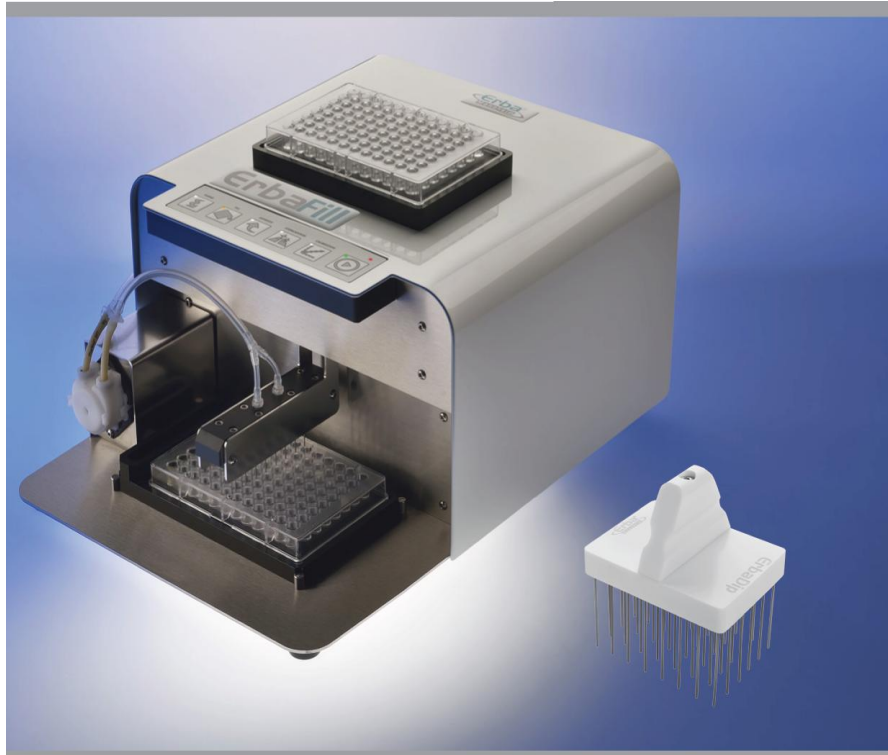


ErbaFill

- Удобная для пользователя
- Быстрый и удобный способ заполнения MIC панелей
- Техническое обслуживание, чистка, калибровка и стерилизация инструмента интуитивно понятны и просты
- Производительность -180 панелей в час



- **Способ дозирования: перистальтический насос**
- **Формат ввода: бутылка 200 мл со суспензионной средой (поставляется поставщиком)**
- **Формат загрузки: 96-луночный микропланшет**
- **Объем среды: 100 мкл**
- **Доступные режимы: продувка, дозирование, стерилизация, калибровка**
- **Метод стерилизации: встроенный режим очистки с использованием этанола**

Автоматизированное рабочее место микробиолога, эпидемиолога, химиотерапевта

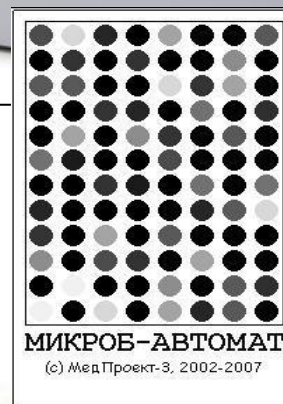

Спасибо за внимание!

**Гураль Наталья Викторовна
ЗАО «Эрба Рус»
8-906-033-40-10
e-mail: n.gural@erbamannheim.com**